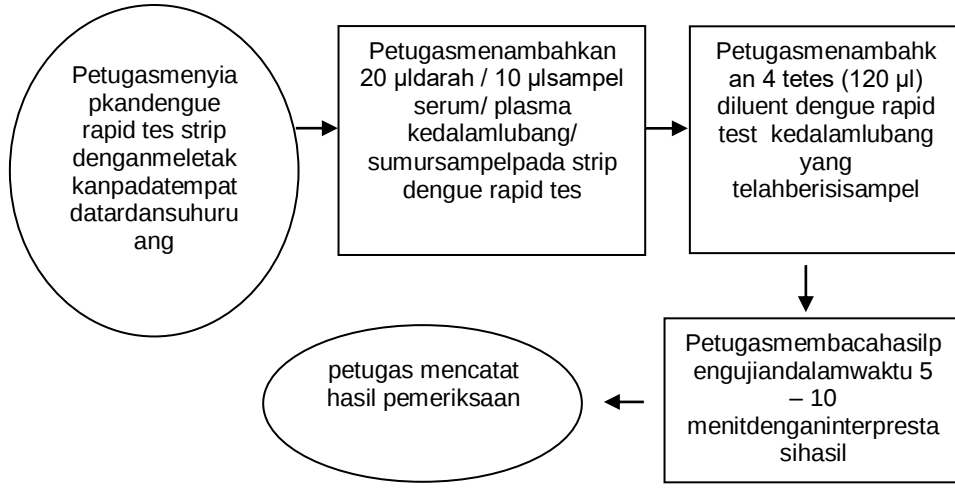


	PEMERIKSAAN DENGUE SOP No. SOP : 441/ /C.VIII.a /PKM-MKB/2022 No. Revisi : Tanggal Terbit : / /2018 Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG		Drg. LISTA ANGGRAINI NIP. 198906122014022006
1. Pengertian	Pemeriksaan Dengue adalah pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan sampel darah/serum/plasma untuk mendeteksi virus dengue dalam darah dengan menggunakan metode kromatografi essay rapid tes.	
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan dengue di Puskesmas Mengkubang.	
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang	
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata	
5. Langkah-langkah	- Petugas menyiapkan dengue rapid tes strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang. - Petugas menambahkan 20 µl darah / 10 µl sampel serum / plasma kedalam lubang / sumur sampel pada strip dengue rapid tes. - Petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent dengue rapid test kedalam lubang yang telah berisi sampel. - Petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 5 – 10 menit dengan interpretasi hasil : - Non reaktif : terbentuk satu garis berwarna pada zona garis kontrol. - Reaktif : terbentuk 2/ 3 garis berwarna yaitu pada zona garis kontrol, zona garis test 1 dan 2. - Petugas mencatat hasil pemeriksaan.	
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Petugas menyiapkan dengue rapid tes strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang]) --> B[Petugas menambahkan 20 µl darah / 10 µl sampel serum / plasma kedalam lubang / sumur sampel pada strip dengue rapid tes] B --> C[Petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent dengue rapid test kedalam lubang yang telah berisi sampel] C --> D[Petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 5 – 10 menit dengan interpretasi hasil] D --> E([petugas mencatat hasil pemeriksaan]) </pre>	
7. Unit terkait	Poliklinik Polikesehatan ibu dan KB Poli anak Poligigi Ruang bersalin dan PONE Laboratorium Ruang tindakan gawat darurat	

8. Rekaman histori perubahan	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PEMERIKSAAN DENGUE			
	DAFTAR TILIK	No. Daftar Tilik : 441/ /C.VIII.b/PKM-MKB/2022		
		No. Revisi :		
		Tanggal Terbit : / /2022		
		Halaman : 1/1		
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			Drg. LISTA ANGGRAINI NIP. 198906122014022006	
NO	KEGIATAN	YA	TIDAK	TB
1.	Apakah petugas menyiapkan dengue rapid tes strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang?			
2.	Apakah petugas menambahkan 20 µl darah / 10 µl sampel serum/ plasma kedalam lubang/ sumur sampel pada strip dengue rapid tes?			
3.	Apakah petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent dengue rapid test kedalam lubang yang telah berisi sampel?			
4.	Apakah petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 5 – 10 menit dengan interpretasi hasil?			
5.	Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan?			

Compliance Rate (CR)%

Pelaksana/ Auditor

(.....)