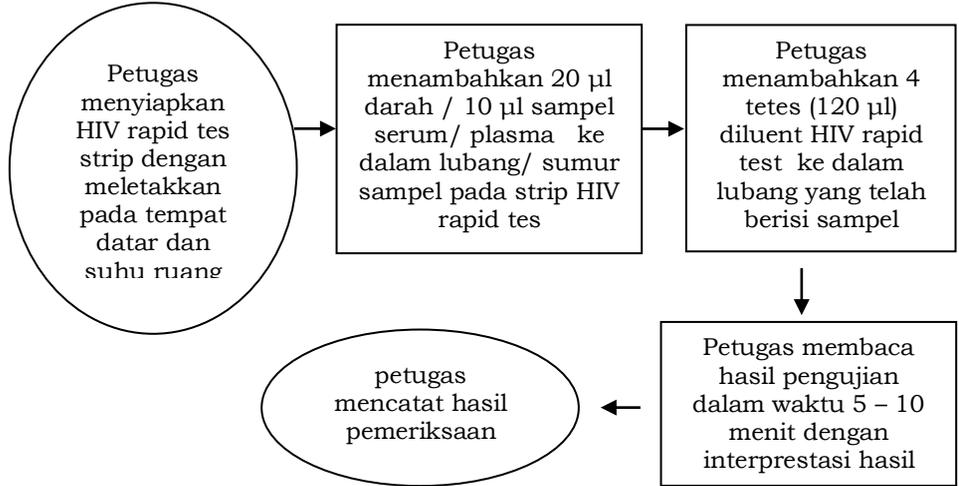


	PEMERIKSAAN HIV		
	SOP	No. SOP : 441/ /C.VIII.a /PKM-MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG	ARIENDA YURISCA NIP. 197907102005012011		
1. Pengertian	Pemeriksaan HIV adalah pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan sampel darah/serum/plasma untuk mendeteksi virus HIV dalam darah dengan menggunakan metode kromatografi essay rapid tes.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan HIV di UPT Puskesmas Mengkubang.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang		
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata Tahun 1968		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan HIV rapid tes strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang. 2. Petugas menambahkan 20 µl darah / 10 µl sampel serum/ plasma ke dalam lubang/ sumur sampel pada strip HIV rapid tes. 3. Petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent HIV rapid test ke dalam lubang yang telah berisi sampel. 4. Petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 5 – 10 menit dengan interpretasi hasil : <ul style="list-style-type: none"> • Non reaktif : terbentuk satu garis berwarna pada zona garis kontrol. • Reaktif : terbentuk 2/ 3 garis berwarna yaitu pada zona garis kontrol, zona garis test 1 dan 2. 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan. 		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Petugas menyiapkan HIV rapid tes strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang]) --> B[Petugas menambahkan 20 µl darah / 10 µl sampel serum/ plasma ke dalam lubang/ sumur sampel pada strip HIV rapid tes] B --> C[Petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent HIV rapid test ke dalam lubang yang telah berisi sampel] C --> D[Petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 5 – 10 menit dengan interpretasi hasil] D --> E([petugas mencatat hasil pemeriksaan]) </pre>		
7. Unit terkait	Poli umum Poli kesehatan ibu dan KB Poli anak Poli gigi Ruang bersalin dan PONEB Laboratorium Ruang tindakan gawat darurat		

8. Rekaman historis perubahan	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PEMERIKSAAN HIV					
	DAFTAR TILIK	No. Daftar Tilik				: 441/ /C.VIII.b/PKM -MKB/2018
		No. Revisi				:
		Tanggal Terbit				: / /2018
		Halaman				: 1/1
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011			
NO	KEGIATAN		YA	TIDAK	TB	
1.	Apakah petugas menyiapkan HIV rapid tes strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang?					
2.	Apakah petugas menambahkan 20 µl darah / 10 µl sampel serum/ plasma ke dalam lubang/ sumur sampel pada strip HIV rapid tes?					
3.	Apakah petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent HIV rapid test ke dalam lubang yang telah berisi sampel?					
4.	Apakah petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 5 – 10 menit dengan interpretasi hasil ?					
5.	Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan?					

Compliance Rate (CR)%

Pelaksana/ Auditor

(.....)