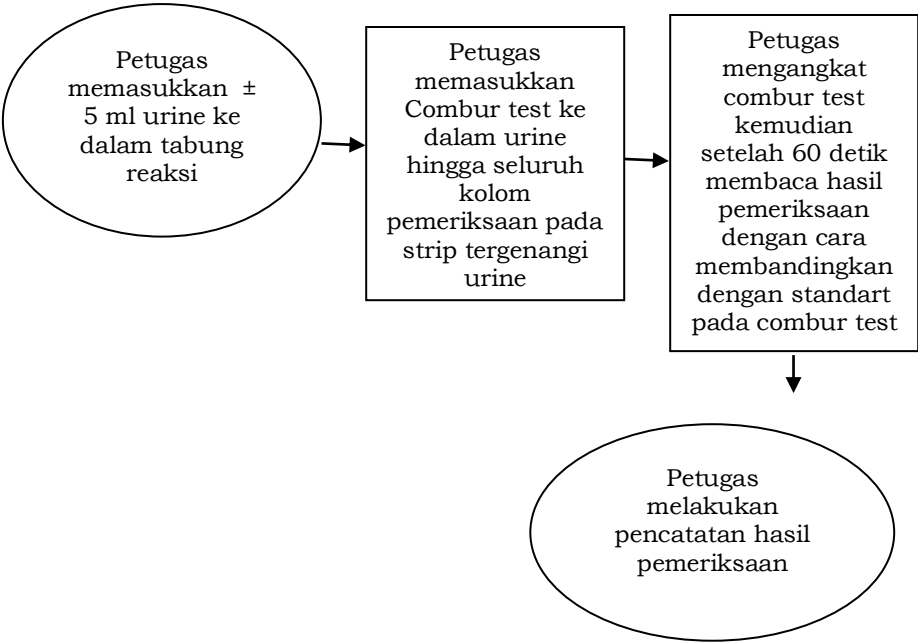


	PEMERIKSAAN PROTEIN URINE SOP No. SOP : 441/ /C.VIII.a/PKM -MKB/2018 No. Revisi : Tanggal Terbit : / /2018 Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG		ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011
1. Pengertian	Pemeriksaan protein urine adalah pemeriksaan laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa urine yang bertujuan untuk mengetahui kadar protein dalam urine dan juga untuk deteksi eklamsi.	
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan protein urine di UPT Puskesmas Mengkubang.	
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang	
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata tahun 1968	
5. Langkah-langkah	- Petugas memasukkan ± 5 ml urine ke dalam tabung reaksi. - Petugas memasukkan Combur test ke dalam urine hingga seluruh kolom pemeriksaan pada strip tergenangi urine. - Petugas mengangkat combur test kemudian setelah 60 detik membaca hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan dengan standart pada combur test. - Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan	
6. Bagan Alir	 <pre> graph LR A([Petugas memasukkan ± 5 ml urine ke dalam tabung reaksi]) --> B[Petugas memasukkan Combur test ke dalam urine hingga seluruh kolom pemeriksaan pada strip tergenangi urine] B --> C[Petugas mengangkat combur test kemudian setelah 60 detik membaca hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan dengan standart pada combur test] C --> D([Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan]) </pre>	
7. Unit terkait	- Poli umum - Poli kesehatan ibu dan KB - Poli gigi - Poli anak - Ruang bersalin dan PONE - Laboratorium - Ruang tindakan gawat darurat	

8. Rekaman historis perubahan				
	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PEMERIKSAAN PROTEIN URINE		
	DAFTAR TILIK	No. Daftar Tilik : 441/ /C.VIII.b/PKM -MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/1	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011

NO	KEGIATAN	YA	TIDAK	TB
1.	Apakah petugas memasukkan ± 5 ml urine ke dalam tabung reaksi?			
2.	Apakah petugas memasukkan Combur test ke dalam urine hingga seluruh kolom pemeriksaan pada strip tergenangi urine?			
3.	Apakah petugas mengangkat combur test kemudian setelah 60 detik membaca hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan dengan standart pada combur test?			
4.	Apakah petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan?			

Compliance Rate (CR)%

Pelaksana/ Auditor

(.....)