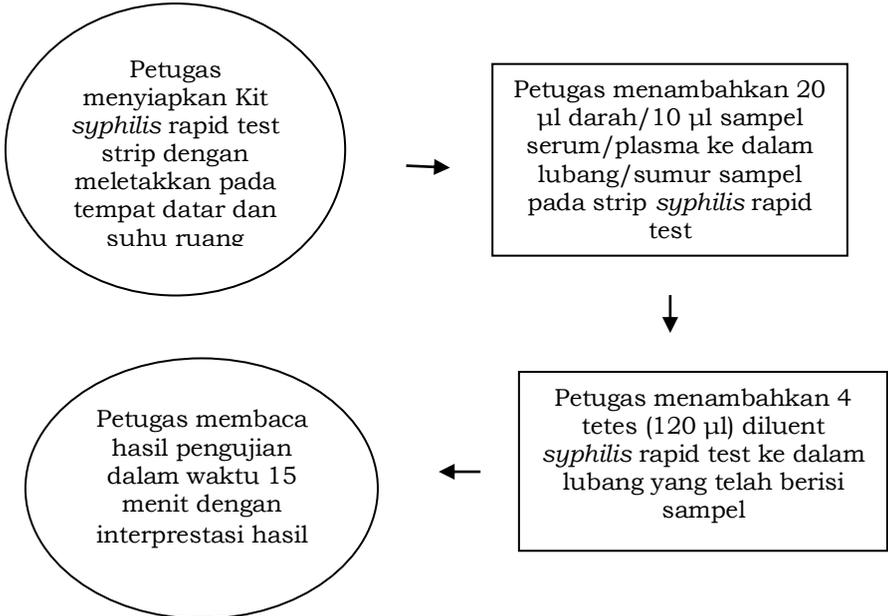


	<b>PEMERIKSAAN SYPHILIS</b>		
	<b>SOP</b>	No. SOP : 441/ /C.VIII.a/PKM -MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG	ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011		
1. Pengertian	Pemeriksaan <i>syphilis</i> adalah pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan sampel darah/serum/plasma untuk mendeteksi bakteri <i>treponema pallidum</i> penyebab <i>syphilis</i> dalam darah dengan menggunakan metode kromatografi essay rapid test.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan <i>syphilis</i> di UPT Puskesmas Mengkubang.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang		
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata tahun 1968		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menyiapkan Kit <i>syphilis</i> rapid test strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang.</li> <li>2. Petugas menambahkan 20 µl darah/10 µl sampel serum/plasma ke dalam lubang/sumur sampel pada strip <i>syphilis</i> rapid test.</li> <li>3. Petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent <i>syphilis</i> rapid test ke dalam lubang yang telah berisi sampel.</li> <li>4. Petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negatif : terbentuk satu garis berwarna pada zona garis kontrol</li> <li>• Positif : terbentuk 2/ 3 garis berwarna yaitu pada zona garis kontrol, zona garis test 1 dan 2.</li> </ul> </li> </ol>		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD     A((Petugas menyiapkan Kit syphilis rapid test strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang)) --&gt; B[Petugas menambahkan 20 µl darah/10 µl sampel serum/plasma ke dalam lubang/sumur sampel pada strip syphilis rapid test]     B --&gt; C[Petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent syphilis rapid test ke dalam lubang yang telah berisi sampel]     C --&gt; D((Petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil)) </pre>		

7. Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poli umum</li> <li>- Poli kesehatan ibu dan KB</li> <li>- Poli gigi</li> <li>- Poli anak</li> <li>- Ruang bersalin dan Poned</li> <li>- Laboratorium</li> <li>- Ruang tindakan gawat darurat</li> </ul>										
8. Rekaman historis perubahan	<table border="1" data-bbox="480 470 1365 732"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 470 561 543">No.</th> <th data-bbox="566 470 764 543">Yang diubah</th> <th data-bbox="769 470 1019 543">Isi perubahan</th> <th data-bbox="1024 470 1365 543">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 543 561 732"></td> <td data-bbox="566 543 764 732"></td> <td data-bbox="769 543 1019 732"></td> <td data-bbox="1024 543 1365 732"></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan				
No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan								

	<b>PEMERIKSAAN SYPHILIS</b>								
	<b>DAFTAR TILIK</b>	No. Daftar Tilik				: 441/ /C.VIII.b/PKM -MKB/2018			
		No. Revisi				:			
		Tanggal Terbit				: / /2018			
		Halaman				: 1/1			
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG		ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011							
NO	KEGIATAN		YA	TIDAK	TB				
1.	Apakah petugas menyiapkan Kit <i>syphilis</i> rapid test strip dengan meletakkan pada tempat datar dan suhu ruang?								
2.	Apakah petugas menambahkan 20 µl darah/10 µl sampel serum/plasma ke dalam lubang/sumur sampel pada strip <i>syphilis</i> rapid test?								
3.	Apakah petugas menambahkan 4 tetes (120 µl) diluent <i>syphilis</i> rapid test ke dalam lubang yang telah berisi sampel?								
4.	Apakah petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil?								

Compliance Rate (CR) .....%

Pelaksana/ Auditor

(.....)