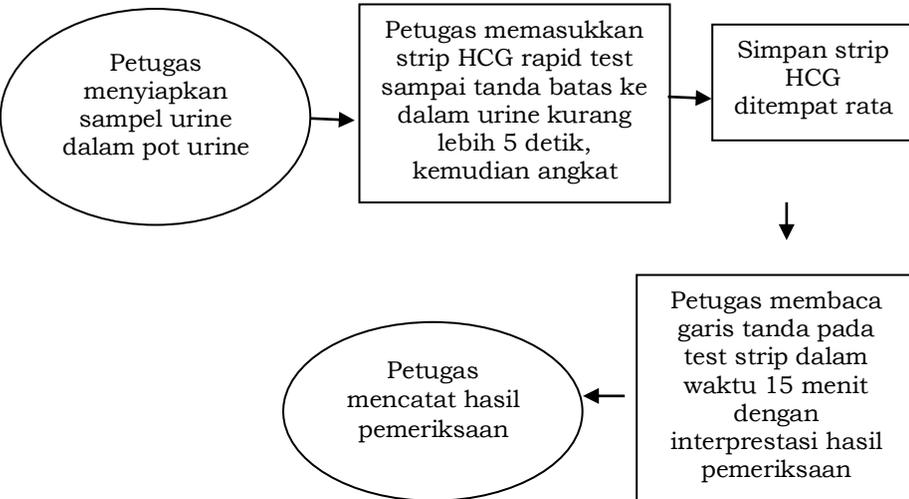


	PEMERIKSAAN TES KEHAMILAN		
	SOP	No. SOP : 441/ /C.VIII.a/PKM -MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG	ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011		
1. Pengertian	Pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui ada tidaknya hormon HCG pada pasien yang sedang hamil		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan tes kehamilan di UPT Puskesmas Mengkubang.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang		
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata tahun 1968		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan sampel urine dalam pot urine 2. Petugas memasukkan strip HCG rapid test sampai tanda batas ke dalam urine kurang lebih 5 detik, kemudian angkat. 3. Petugas menyimpan strip HCG ditempat rata 4. Petugas membaca garis tanda pada test strip dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil pemeriksaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Negatif : terbentuk 1 garis berwarna pada zona garis kontrol. • Positif : terbentuk 2 garis berwarna pada zona garis kontrol dan garis test. 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan. 		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Petugas menyiapkan sampel urine dalam pot urine]) --> B[Petugas memasukkan strip HCG rapid test sampai tanda batas ke dalam urine kurang lebih 5 detik, kemudian angkat] B --> C[Simpan strip HCG ditempat rata] C --> D[Petugas membaca garis tanda pada test strip dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil pemeriksaan] D --> E([Petugas mencatat hasil pemeriksaan]) </pre>		
7. Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Poli umum - Poli kesehatan ibu dan KB - Poli gigi - Poli anak - Ruang bersalin dan PONEB - Laboratorium - Ruang tindakan gawat darurat 		

8. Rekaman historis perubahan	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PEMERIKSAAN TES KEHAMILAN		
	DAFTAR TILIK	No. Daftar Tilik : 441/ /C.VIII.b/PKM -MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
	Halaman : 1/1		
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011

NO	KEGIATAN	YA	TIDAK	TB
1.	Apakah petugas menyiapkan sampel urine dalam pot urine?			
2.	Apakah petugas memasukkan strip HCG rapid test sampai tanda batas ke dalam urine kurang lebih 5 detik, kemudian angkat?			
3.	Apakah petugas menyimpan strip HCG ditempat rata?			
4.	Apakah petugas membaca garis tanda pada test strip dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil pemeriksaan?			
5.	Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan?			

Compliance Rate (CR)%

Pelaksana/ Auditor

(.....)