


	PEMERIKSAAN ASAM URAT		
	SOP	No. SOP : 441/ /C.VIII.a/PKM -MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011
1. Pengertian	Pemeriksaan asam urat adalah suatu metode pemeriksaan asam urat di dalam darah secara kuantitatif dengan mengukur reaksi dengan elektroda yang terdapat pada strip.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan asam urat di UPT Puskesmas Mengkubang.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang		
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata tahun 1968		
5. Langkah-langkah	1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan asam urat darah. 2. Petugas memasukan strip asam urat ke dalam alat periksa. 3. Petugas mengusap jari pasien yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 4. Petugas menusuk jari pasien dengan menggunakan lanset. 5. Petugas menempelkan darah pasien yang telah di tusuk pada strip asam urat. 6. Kemudian petugas mengangkat alat periksa setelah ada tanda bunyi “tit” yang menandakan sampel darah dalam proses pemeriksaan alat. 7. Petugas menunggu selama 20 detik. 8. Petugas membaca hasil pemeriksaan pada layar alat periksa. 9. Petugas mencatat hasil pemeriksaan.		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A((Petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan asam urat darah)) --> B[Petugas memasukan strip asam urat ke dalam alat periksa] B --> C[Petugas mengusap jari pasien yang akan ditusuk dengan kapas alkohol] C --> D[Petugas menusuk jari pasien dengan menggunakan lanset] D --> E[Petugas menempelkan darah pasien yang telah di tusuk pada strip asam urat] E --> F[Kemudian angkat alat periksa setelah ada tanda bunyi "tit" yang menandakan sampel darah dalam proses pemeriksaan alat] F --> G[Petugas menunggu selama 20 detik] G --> H[Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada layar alat periksa.] H --> I((Petugas mencatat hasil pemeriksaan)) </pre>		
7. Unit terkait	- Poli umum - Poli kesehatan ibu dan KB		

	- Poli gigi - Poli anak - Ruang bersalin dan Poned - Laboratorium - Ruang tindakan gawat darurat								
8. Rekaman historis perubahan	<table><tr><th>No.</th><th>Yang diubah</th><th>Isi perubahan</th><th>Tanggal mulai diberlakukan</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan				
No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan						

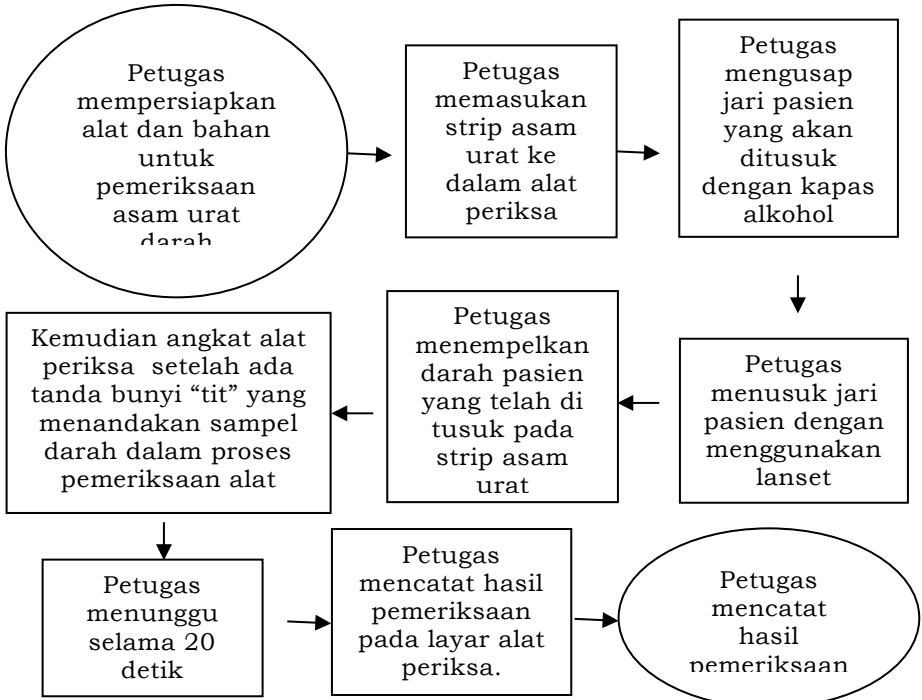

PEMERIKSAAN ASAM URAT



		DAFTAR TILIK	No. Daftar : 441/ Tilik /C.VIII.b/PKM -MKB/2018					
			No. Revisi :					
			Tanggal Terbit : / /2018					
			Halaman : 1/1					
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG						ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011		
NO	KEGIATAN					YA	TIDAK	TB
1.	Apakah petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan asam urat darah?							
2.	Apakah petugas memasukkan strip asam urat ke dalam alat periksa?							
3.	Apakah petugas mengusap jari pasien yang akan ditusuk dengan kapas alcohol?							
4.	Apakah petugas menusuk jari pasien dengan menggunakan lanset?							
5.	Apakah petugas menempelkan darah pasien yang telah di tusuk pada strip asam urat?							
6.	Apakah petugas kemudian mengangkat alat periksa setelah ada tanda bunyi “tit” yang menandakan sampel darah dalam proses pemeriksaan alat?							
7.	Apakah petugas menunggu selama 20 detik?							
8.	Apakah setelah 20 detik hasil pemeriksaan akan muncul pada layar alat periksa?							
9.	Apakah petugas membaca hasil pemeriksaan pada layar alat periksa?							

Compliance Rate (CR)%

Pelaksana/ Auditor

(.....)