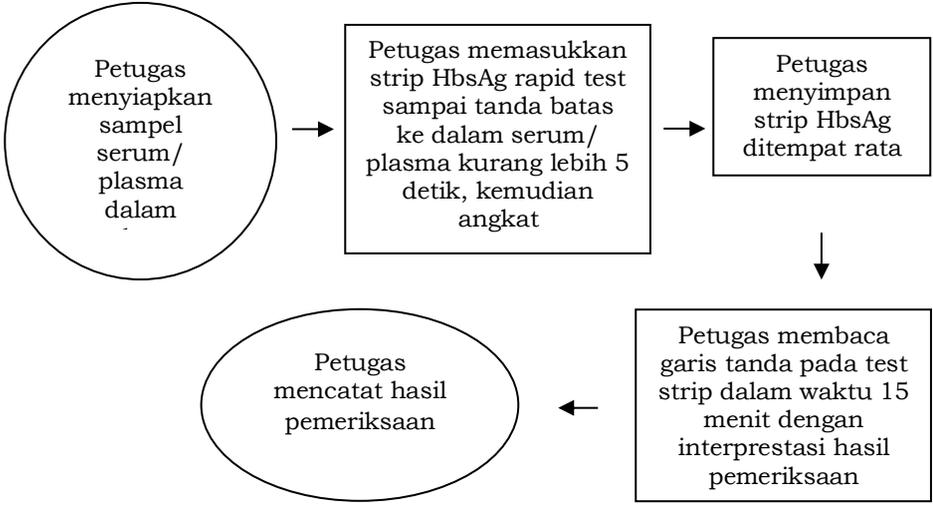


	PEMERIKSAAN HbsAg		
	SOP	No. SOP : 441/ /C.VIII.a /PKM-MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG	ARIENDA YURISCA NIP. 197907102005012011		
1. Pengertian	Pemeriksaan HbsAG adalah pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan sampel serum/ plasma untuk mendeteksi ada tidaknya antigen spesifik untuk HbsAg.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan HbsAg di Puskesmas Mengkubang.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang		
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan sampel serum/ plasma dalam tabung. 2. Petugas memasukkan strip HbsAg rapid test sampai tanda batas ke dalam serum/ plasma kurang lebih 5 detik, kemudian angkat. 3. Petugas menyimpan strip HbsAg ditempat rata 4. Petugas membaca garis tanda pada test strip dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil pemeriksaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Negatif : terbentuk 1 garis berwarna pada zona garis kontrol. • Positif : terbentuk 2 garis berwarna pada zona garis kontrol dan garis test. 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan. 		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A((Petugas menyiapkan sampel serum/ plasma dalam)) --> B[Petugas memasukkan strip HbsAg rapid test sampai tanda batas ke dalam serum/ plasma kurang lebih 5 detik, kemudian angkat] B --> C[Petugas menyimpan strip HbsAg ditempat rata] C --> D[Petugas membaca garis tanda pada test strip dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil pemeriksaan] D --> E((Petugas mencatat hasil pemeriksaan)) </pre>		
7. Unit terkait	Poli umum Poli kesehatan ibu dan KB Poli anak Poli gigi Ruang bersalin dan PONEB Laboratorium Ruang tindakan gawat darurat		

8. Rekaman historis perubahan	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PEMERIKSAAN HbsAg							
	DAFTAR TILIK	No. Daftar Tilik : 441/ /C.VIII.b/PKM -MKB/2018						
		No. Revisi :						
		Tanggal Terbit : / /2018						
Halaman : 1/1								
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG		ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011						
NO	KEGIATAN	YA	TIDAK	TB				
1.	Apakah petugas menyiapkan sampel serum/ plasma dalam tabung?							
2.	Apakah petugas memasukkan strip HbsAg rapid test sampai tanda batas ke dalam serum/ plasma kurang lebih 5 detik, kemudian angkat?							
3.	Apakah petugas menyimpan strip HbsAg ditempat rata?							
4.	Apakah petugas membaca garis tanda pada test strip dalam waktu 15 menit dengan interpretasi hasil pemeriksaan?							
5.	Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan?							

Compliance Rate (CR)%

Pelaksana/ Auditor

(.....)